

GUIA DE MONTAGEM

CARRINHO DE VACINAÇÃO SUÍNA



SANTAFÉ

VOCÊ PEDE, NÓS CRIAMOS

IMPORTANTE!

- **Superfície plana:** monte sempre o carrinho sobre uma mesa ou piso nivelado para garantir o alinhamento correto da estrutura;
- **Organização das peças:** confira se todas as peças e parafusos foram recebidos antes de iniciar a montagem;
- **Conferência final:** após montar as rodas e apertar os parafusos, apoie o carrinho no chão para checar estabilidade e firmeza.

Itens que acompanham o produto: 01 guia de montagem.

Passo 01

MONTAGEM DO CABO

1. Inicia-se a montagem pela parte do cabo;
2. São necessários 2 pés compridos (pés que contêm as sapatas de apoio), 3 travessas curtas, 1 cabo, e 2 suportes do cabo;
3. Dica de montagem: Para facilitar a montagem, apenas encostar os parafusos com as mãos. Realizar o aperto de todos os parafusos após todas as peças estiverem montadas.



Figura 1 - Vista explodida da montagem do cabo



Figura 2 - Montagem do cabo concluída

Passo 02

MONTAGEM DA FACE FRONTAL

1. Para a montagem da face frontal são necessários 2 pés sem sapatas e 3 travessas curtas;
2. Montam-se as travessas de forma que a parte dos pés com dois furos próximos fiquem para baixo.



Figura 3 - Vista explodida da face frontal



Figura 4 - Vista da face frontal montada

Passo 03

MONTAGEM DAS TRAVESSAS COMPRIDAS

1. Para a montagem das travessas compridas, serão utilizadas as faces do cabo e a face frontal já montadas;
2. Estas duas peças serão ligadas por 6 travessas compridas, sendo 3 em cada lado;
3. As travessas compridas ficam por cima das travessas curtas.

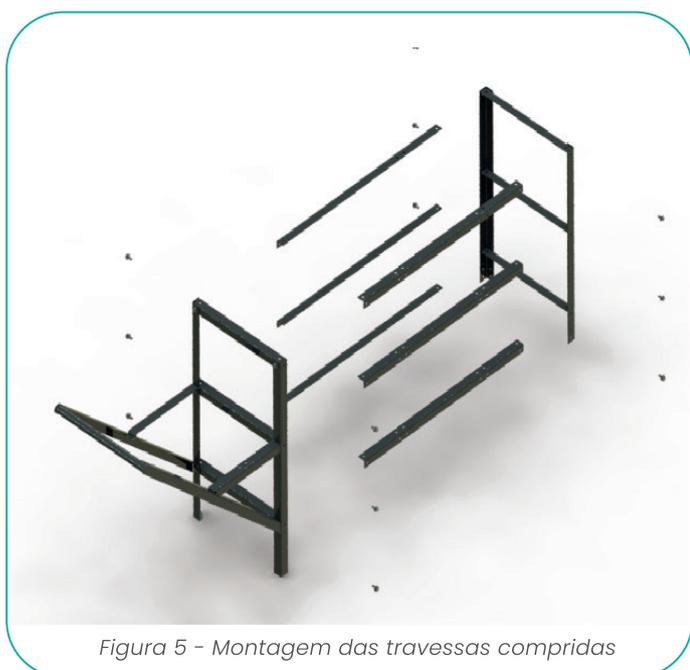


Figura 5 - Montagem das travessas compridas

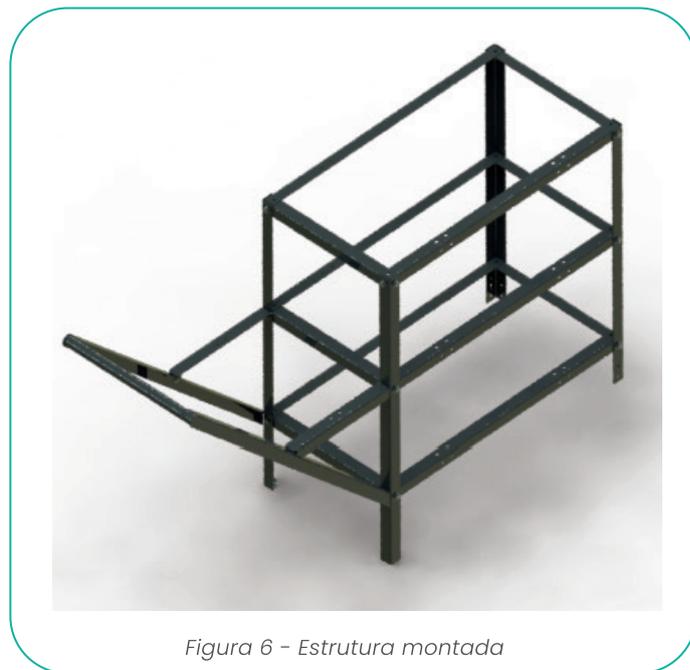


Figura 6 - Estrutura montada

Passo 04

MONTAGEM DOS SUPORTES DE RODAS

1. Para a montagem dos suportes de rodas recomenda-se virar o carrinho sobre uma mesa de montagem;
2. Esta ação facilita a posição de montagem, e a parte plana da estrutura ficará totalmente apoiada sobre a mesa de montagem, facilitando o alinhamento das peças;
3. Para a montagem dos suportes de roda são necessários dois suportes de roda, um de frente para o outro;
4. As abas dos suportes devem ficar para o lado interno do carrinho.



Figura 7 - Vista explodida da montagem do suporte de rodas



Figura 8 - Estrutura com suporte de rodas montado

Passo 05

MONTAGEM DO EIXO E RODAS

1. O eixo das rodas deve ser inserido nos suportes na direção axial;
2. O eixo deve ser inserido até que os furos de trava internos fiquem por fora dos suportes de roda em ambos os lados, com isso, pode-se travar o eixo na posição com dois pinos trava;
3. Com o eixo instalado no local, pode-se acoplar as rodas;
4. Deve-se colocar uma arruela de encosto em cada lado da roda (uma por dentro e outra por fora);
5. Com a roda e as arruelas no local, é colocado mais um pino trava em cada lado para manter as rodas no local;
6. Após a montagem as rodas, pode-se realizar o aperto de todos os parafusos, mantendo a estrutura apoiada sobre uma mesa plana e conferindo o alinhamento da estrutura;
7. Após o aperto dos parafusos, coloca-se o carrinho com as rodas no chão e monta-se a base da lixeira.



Figura 9 - Montagem do eixo



Figura 10 - Eixo instalado e vista da montagem das rodas



Figura 11 - Eixo com as rodas montadas

Passo 06

MONTAGEM DO SUPORTE DA LIXEIRA

1. Para a montagem do suporte da lixeira são utilizados 2 chapas de suporte e um cesto;
2. As chapas de suporte são parafusadas por fora do cesto;
3. Cuidar para que as porcas fiquem para o lado de fora.



Figura 12 - Vista explodida do suporte da lixeira



Figura 13 - Suporte da lixeira montado

Passo 07

MONTAGEM DO SUPORTE DA LIXEIRA NA ESTRUTURA

1. O suporte da lixeira montado é fixado sobre os braços de sustentação do cabo;
2. Após estas etapas a estrutura está toda montada, necessitando apenas encaixar as bandejas e a lixeira.



Figura 14 - Posição do suporte da lixeira na estrutura



Figura 15 - Suporte da lixeira montado no carrinho

Passo 08

MONTAGEM DAS BANDEJAS E LIXEIRA

1. As bandejas e a lixeira são apenas apoiadas sobre as travessas, não necessitando de nenhuma fixação;
2. São fornecidas 12 bandejas e 1 lixeira.



Figura 16 - Vista do posicionamento das bandejas e lixeira



Figura 17 - Carrinho completo após a montagem



SANTAFÊ

VOCÊ PEDE, NÓS CRIAMOS

 Av. Presidente Kennedy
nº 1800 | Civemara
Maravilha - SC
CEP: 89874-000

 +55 (49) 3664-3539

 www.santafemh.com.br

 santafe@santafemh.com.br